

Instalação app Kardia de Alivecor

- 1) Reset da conta do iPhone, de modo a criar uma conta nova;
- 2) Na criação de uma nova apple ID, colocar morada, código-postal, etc com residência em Inglaterra, ou outro país na qual a app funcione (ver no site);
- 3) Para se "inventar" tal morada, basta recorrer ao Google, e pesquisar rua e código – postal dessa rua;
- 4) Deixar definições na língua estrangeira;
- 5) Instalar a app através da Apple Store;
- 6) A aplicação irá requerer um registo, sendo que as medições para o rastreio serão feitas no modo "Guest", e não nas medições "Standard" do usuário (senão ficarão gravadas no perfil e não poderão ser editadas/reencaminhadas para o médico);
- 7) Os ECG realizados com a app poderão ser enviados da mesma para o e-mail pessoal em PDF, onde poderão ser impressas/guardadas no PC para o cardiologista/médico de família poder observar.



